

## CSM Cerebral State Monitor™

### Plug & Play für VueLink-Monitoring-Systeme (VOI)

**Der CSM Cerebral State Monitor™ kann in VueLink-kompatible Monitoring-Systeme (VOI) integriert werden. Dies ermöglicht die Darstellung der Parameter des CSM auf den Monitoring-Systemen im OP und der Intensivstation. Mit der Option VueLink ist der Einsatz in Monitoren von Philips, HP oder Agilent möglich.**



VueLink M 1032A-A05 zur Darstellung der CSM-Daten auf Monitoren von Philips, HP oder Agilent

Für diese Anwendung werden das CSM Link für VueLink und das VueLink-Modul benötigt. Das CSM™ verbleibt in dieser Konfiguration direkt am Patienten und nimmt die Daten auf. Das CSM™ bietet hierbei weiterhin seine volle Funktionalität, d.h. es können alle Daten direkt im Display verfolgt werden.

Die Daten des CSM™ werden drahtlos online zum CSM Link für VueLink™ übermittelt, der monitornah auf die Frontbuchse des VueLink-Moduls aufgesteckt wird. Die drahtlose Verbindung zwischen CSM™ und CSM Link für VueLink™ ist einzigartig und bewahrt die Bewegungsfreiheit des Anästhesisten.

Am Monitor werden zeitgleich (*RealTime Mode*) alle numerischen Daten und der EEG Kurvenverlauf dargestellt. Die CSM™ Parameter werden somit Bestandteil der permanenten Patienten-Datenaufzeichnung.

Der Patientenmonitor übernimmt beim Einschalten automatisch alle Einstellungen des CSM™. Alarmfunktionen werden beibehalten und über den Patientenmonitor wiedergegeben. Alle CSM™-spezifischen Einstellungen werden im CSM Link für VueLink™ gespeichert. Damit wird der wechselnde Einsatz der CSM™ Monitore ermöglicht, ohne Durchführung der Setup-Prozedere an den Patientenmonitoren. Für das elegante Wechseln zwischen verschiedenen VueLinks (z.B. Einleitung – OP – Ausleitung) kann eine EasyLink-Software im CSM installiert werden.

Für den Einsatz in Philips Monitoren werden folgende Baugruppen benötigt:

1 Philips VueLink Modul M 1032A-A05  
1 CSM Link für VueLink plug&play

Verwendbar in folgenden Patientenmonitoren:

Philips	IntelliVue MP40, MP50, MP60, MP70, MP90
HP	Viridia V24/26, CMS 2002
Agilent	alle Open Interface (VOI)-Modelle

Softwarestand des VueLinks A05 erforderlich!  
Funktionalität des Patientenmonitors abhängig vom Software-Release.